



EINFACHE INSTRUMENTENVORBEHANDLUNG

Aniosyme Foam

GEBRAUCHSFERTIGER VORBEHANDLUNGSSCHAUM FÜR MEDIZINISCHE INSTRUMENTE

Schaum Spray zur reinigenden Vorbehandlung von medizinischen Instrumenten. Sorgt für ein optimiertes Anlöseverhalten auf Instrumenten bei längerer Standzeit oder vor der maschinellen Aufbereitung.

Aniosyme Foam bietet:

- **Einfach** - Einfach in der Anwendung
- **Schnell** - verhindert das Antrocknen von Anschmutzung
- **Effektiv** - stabiler Schaum für eine gute Benetzung



Aniosyme Foam


Gebrauchsfertiger Vorbehandlungsschaum für medizinische Instrumente

UNSERE LEISTUNG:	IHR NUTZEN
Einfach in der Anwendung	Gebrauchsfertige Lösung in griffiger Flasche
Schnell - verhindert das Antrocknen von Verschmutzung	Erleichtert den weiteren Aufbereitungsprozess
Effektiv - stabiler Schaum für eine gute Benetzung	Aufbereitung kann schon im OP anfangen

EINSATZBEREICHE

Gebrauchsfertiger Vorbehandlungsschaum für ein optimiertes Anlöseverhalten auf Instrumenten aller Art bei längerer Standzeit von bis zu 72 Stunden oder vor der maschinellen Aufbereitung. Verhindert das Antrocknen von Verunreinigungen und erleichtert die Vorreinigung durch eine gute Reinigungswirkung. Eine gleichmäßige Bedeckung der Instrumentenoberfläche ist durch den dicken Schaum gewährleistet. Aniosyme Foam ist kompatibel mit einer Vielzahl an Materialien. Nicht geeignet für Instrumentarium aus Zink oder Eisen.

ANWENDUNGSHINWEISE

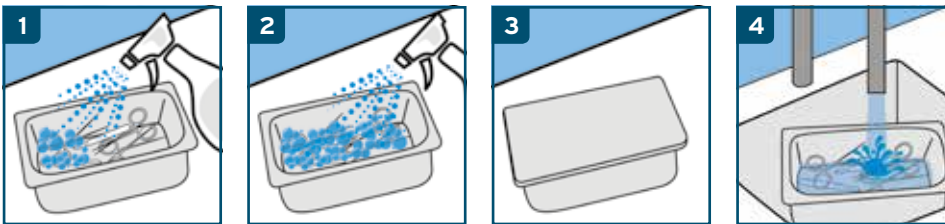

1. Aniosyme Foam gleichmäßig auf die medizinischen Instrumente sprühen bis die Oberflächen vom Schaum bedeckt sind.
2. Die Instrumentenoberflächen müssen vollständig mit Schaum benetzt sein.
3. Den Container / Transportbox mit dem Deckel abdecken.
4. Vor der Weiterbehandlung (manuelle oder maschinelle Aufbereitung) die Instrumente gründlich mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität abspülen.

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Aniosyme Foam	12 x 750 ml Sprühflasche	30 914 20 PZN 138 795 83



ANIOS
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ANWENDUNGSBEREICH

Feuchthaltung von medizinischen und chirurgischen Instrumenten während des Transports in der Feuchtentorgung oder vor der maschinellen Aufbereitung. Das Produkt hält einen ausreichenden Feuchtigkeitsgrad aufrecht, um das Anrocknen von Blut und anderen Verschmutzungen zu vermeiden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Aniosyme Foam gleichmäßig auf die medizinischen Instrumente sprühen bis die Oberflächen vollständig vom Schaum bedeckt sind. Den Container / Transportbox mit dem Deckel abdecken. Vor der Weiterbehandlung (manuelle oder maschinelle Aufbereitung) die Instrumente gründlich mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität abspülen.

ZUSAMMENSETZUNG

Nichtionische Tenside, Enzyme (Proteasen, Lipasen und Amylasen), Komplexbildner, Hilfsstoffe.

LAGERUNG

Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +35°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Etiketten und Produktinformationen



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB®

www.ecolab.com