

Dosiertabelle Incidin® Active



Liter Lösung	Konzentration der Anwendungslösung		
	1%	2%	3%
2 Liter	30 ml = 1x	60 ml = 2x	90 ml = 3x
4 Liter	60 ml = 2x	120 ml = 4x	180 ml = 1x 1x
6 Liter	90 ml = 3x	180 ml = 1x 1x	270 ml = 1x 1x
8 Liter	120 ml = 4x	240 ml = 1x	360 ml = 2x 2x
10 Liter	150 ml = 1x	300 ml = 1x 2x	450 ml = 3x

Messlöffel = 30 ml = 20 g
 Messbecher = 150 ml = 100 g
 Dose = 240 ml = 160 g

Anwendungshinweise:

Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Pulvermenge mit Dosierbecher/-löffel einstreuen. Mehrmals kurz umrühren. Nach 15 Min. ist die Lösung einsatzbereit. Die Lösung ist arbeitstäglich zu wechseln.