

KLARSPÜLER FÜR INSTRUMENTARIUM

Anios RL

KLARSPÜLER FÜR INSTRUMENTARIUM

- Trocknungsaktivator für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung
- Materialverträglich mit Polysulfon (PSU)
- Geeignet für jeden Maschinentyp



Anios RL
5 L Kanister



Anios RL
20 L Kanister

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

- Klare, farblose Flüssigkeit
- pH Wert* (Konzentrat) 20°C: ca. 7,2
- pH Wert* bei 0,08%: ca. 5,8
- pH Wert* bei 0,3%: ca. 6,2
- Dichte (Konzentrat) 20°C 1,013 g/ml

*pH Wert Messungen unter Betriebsbedingungen mit Hilfe eines pH - Meters mit Temperaturkompensation.

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios RL	2 x 5 Liter Kanister	3112390 PZN: 169 319 18
Anios RL	20 Liter Kanister	3124560 PZN: 169 319 24
Anios RL	200 Liter Fass	3118930



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ANWENDUNGSBEREICH

Neutraler Klarspüler für chirurgische und medizinische Instrumente. Anios RL sorgt für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Flüssigkonzentrat. Verwenden Sie eine Anwendungslösung von 0,08% bis 0,3% (0,8 ml - 3 ml / Liter Wasser). Dosierbar bei jeder Wassertemperatur, je nach Reinigungs- und Desinfektionsmittelgeräte Typ.

INHALTSSTOFFE

Tensidkombination, Entschäumer, Stabilisierungsmittel, Hilfsstoffe.

LAGERUNG


Gefahrgut - Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

SICHERE VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf Etiketten und Produktdatenblatt.

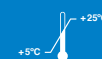

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

