



Incidin® Plus

DAS PLUS AN SICHERHEIT FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

- ▲ Patentierter Wirkstoff Glucoprotamin®
- ▲ Breites Wirkspektrum und hervorragende Reinigungsleistung
- ▲ VAH- und RKI-gelistet



Incidin® Plus

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL MIT GLUCOPROTAMIN®
ALDEHYDFREI UND OHNE QAV



Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. MRSA, TB) und Hefen	Hohe Desinfektionssicherheit auf allen abwaschbaren Flächen, selbst in Risikobereichen
Auf Basis des patentierten Wirkstoffes Glucoprotamin®	Optimale Desinfektion und Reinigung in Kombination mit vollständiger, biologischer Abbaubarkeit
Hohe Materialverträglichkeit	Für alle Arten von Oberflächen und Böden geeignet



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte

CE 0297



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.
D BIOZID N-11720

WIRKSAMKEIT

KONZENTRATION

EINWIRKZEIT

VAH-Liste (bakterizid, levurozid)	%	ml/L	Min.
Flächendesinfektion gemäß VAH, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	2 1 0,5 0,25	20 10 5 2,5	15 30 60 240
RKI-Liste	%	ml/L	Min.
Flächendesinfektion Wirkungsbereich A	8	80	360
IHO-Viruzidie-Liste	%	ml/L	Min.
Prüfung gemäß DVV mit / ohne Belastung			
Begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,25 / 0,5	2,5 / 5	60 / 15
Rotavirus	0,5	5	15
Adenovirus	1	10	60
Papova-Viren / Polyomavirus SV40	0,5 / 1	5 / 10	60 / 30
EURO-Normen	%	ml/L	Min.
EN 1276 (bakterizid, mit Belastung)	0,25	2,5	5
EN 13697 (bakterizid, mit / ohne Belastung)	0,25	2,5	5
EN 13697 (levurozid, mit / ohne Belastung)	0,25	2,5	15
EN 1650 (levurozid)	0,25	2,5	15
Zusätzliche Wirksamkeiten	%	ml/L	Min.
TBC **	0,25 / 0,5 / 1	2,5 / 5 / 10	60 / 30 / 15
MRSA	0,5	5	60
Influenza Viren (H1N1, A / H5N1) ***	0,5	5	15
Tuberkoluzid + Mykobakterizid ****	1,5 / 3	15 / 30	60 / 30

* gem. RKI-Empfehlung 1/2004 ** Suspensionstest mit Mycobacterium terrae (DGHM 1996) *** aufgrund begrenzter Viruzidie **** Flächentest gem. DGHM 2001

EINSATZBEREICHE

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten: 26 g Glucoprotamin®

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Incidin® Plus
Kunststoffkanister

30 115 20
6 L

Produkte



Dosierung



Service



Sicherheit



UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

Worldwide Headquarters
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Regional Office
Ecolab GmbH
Rivergate, Handelskai 92
1200 Wien, Österreich
Phone +43 1 715 2550-0
Fax +43 1 715 2550-2856
www.ecolab.at

Regional Office
Ecolab Schweiz GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Phone +41 (0) 614 66 94-66
Fax +41 (0) 614 66 94-55
www.ecolab-suisse.ch

